

## Gebrauchsanweisung: mikrozid® sensitive wipes / liquid / wipes premium Qualität. Sicherheit. schülke.



### Indikationen:

#### Reinigungs- und Desinfektionstücher für Arbeitsflächen und medizinische Geräte

- strapazierfähig und gut imprägniert, kein Zerreißen, kein Zusammendrehen der Tücher
- gute Benetzung der Oberflächen

### Anwendungsmethoden /-hinweise:

#### mikrozid® sensitive wipes

- Mit einem ersten Desinfektionstuch reinigen. Auf vollständige Benetzung aller Oberflächen achten.
- Vorgang mit einem zweiten Tuch, diesmal zur Desinfektion, wiederholen. Trocknen lassen.
- Behälter mikrozid® sensitive wipes mit 200 Stück nachfüllbar

#### mikrozid® sensitive liquid

- Unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen.
- Auf vollständige Benetzung achten.

### Normierung:

- wirksam gegen Bakterien (inkl. Tb) und C. albicans (geprüft nach DGHM-Richtlinien)
- begrenzt viruzid\*, (inkl. HIV, HBV, HCV), Rota, Papova- und Noroviren (15 Minuten)
- wirksam gegen Bakterien und Hefen innerhalb 1 Minute
- VAH / DGHM-gelistet
- Packmittel recyclingfähig

\* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 08/2008

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



### Schritt 1

Zuerst Hände desinfizieren.  
Zum Schutz der Haut Handschuhe anziehen.

## mikrozid® sensitive wipes / wipes premium



### Schritt 2

Tuch aus der Dose / dem Softpack nehmen und Oberfläche mit getränktem Tuch gründlich wischen, um sie zu reinigen und zu desinfizieren.



### Schritt 3

Auf vollständige Benetzung achten. Zur Anwendung auf besonders großen Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.



### Schritt 4

Für eine optimale Wirkung trocknen lassen, bis die Lösung sich vollständig verflüchtigt hat.



### Schritt 5

Sticker mit Verfallsdatum und Chargennummer abziehen und auf die Dose kleben. Nachfüllpack oben aufschneiden und kompletten Beutel in die Dose einsetzen. Nach Anbruch der Verpackung garantiert schülke eine Haltbarkeit von 3 Monaten.

## mikrozid® sensitive liquid



### Schritt 2

Mit schülke wipes oder Einmaltuch\*. Desinfektionsmittel unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen. Einwirken und trocknen lassen.  
\*Achtung: Keine Cellulosestoffe verwenden.



### Schritt 3

Verschmutzte Oberfläche:  
**Technik: Aufbringen – Wischen – Aufbringen**  
Überschüssige Präparatemengen mit einem ungefärbten Einmaltuch entfernen. Trocknen lassen.

### Benötigen Sie Informationen?

Kontaktieren Sie uns: Schülke & Mayr GmbH | D-22840 Norderstedt | Tel. +49-40-521 00-666 | Fax +49-40-521 00-660 | www.schuelke.com | info@schuelke.com