## Montageanleitung


9590.ECO.1F









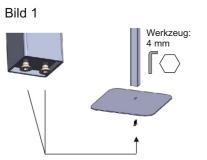

Die Montageschrauben befinden sich vormontiert am Ständer. Schrauben lösen und zur Befestigung der Bodenplatte (Bild1) und des Armhebelspenders (Bild 2) verwenden.



Desinfektionsmittelbehälter füllen und Dosierpumpe aufschrauben.

Bügel (Armhebel) nach oben ziehen und Desinfektionsmittel einsetzen. Dabei den Dosierlauf der Dosierpumpe durch die Längsöffnung des Armhebelspenders führen und Flasche positionieren.







19.653.00 / REV01 / 11.20

