



Cederroth Burn Cover

Cederroth Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz. Das Wundkissen besteht aus einem kühlenden Hydrogel, das die Nervenfasern der Haut bedeckt und zur Schmerzlinderung beiträgt. Gleichzeitig sorgt das Pflaster für ein feuchtes Wundklima, das der Bildung von Wundschorf entgegenwirkt und schnellere Wundheilung ermöglicht. Das Wundkissen verklebt nicht mit der Wunde. Burn Cover eignet sich auch für kleinere Schnitt- und Schürfwunden.

Durch seine blaue Färbung zur besseren Sichtbarkeit eignet sich Cederroth Burn Cover für die Anwendung bei der Hantierung von Lebensmitteln.

Produktvorteile

- Schmerzlinderung
- Schnellere Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde

Anwendung:

- Vor dem Aufkleben von Burn Cover die Brandwunde mindestens 20 Minuten kühlen (z. B. mit Cederroth Burn Gel) oder mit lauwarmem Wasser spülen
- Nicht für große und schwere Brandwunden oder infizierte oder blutende Wunden anwenden
- Pflaster täglich wechseln und Wunde reinigen
- Bei Austrocknung Pflaster vor dem Entfernen befeuchten
- Bei Komplikationen ärztlichen Rat einholen

Jede Verpackung enthält 10 sterile Pflaster (74 x 45 mm).
Das Wundkissen besteht aus einem wasserbasierten Hydrogel.

Die Verpackung passt in die Erste-Hilfe-Stationen von Cederroth.

Cederroth Burn Cover	
10 St/Schachtel	10 Schachtel/SKU
REF 901903	
Schachtel Größe: 25 x 77 x 106 mm	
Haltbarkeit: 3 Jahre	