



Gebrauchsfertige, mit alkohol-
freier Wirkstofflösung getränkte
Desinfektionstücher.

mikroloid® sensitive wipes

Unser Plus:

- alkoholfrei
- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- sehr schnell und gut wirksam
- für alkoholempfindliche Flächen
- praktische Jumbogröße

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Medizinprodukten [**CE** 0297] und anderen Flächen.

Besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen (wie z. B. Plexiglas und Ultraschallköpfe).

Anwendungshinweise

Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Zur Anwendung auf besonders großen Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

mikroloid® sensitive wipes wirkt gegen:

- Bakterien • Pilze • Viren (wie z. B. HBV, HIV, Rota, Vaccinia)

Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (C. albicans) (gemäß VAH-/DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HCV, HBV)	1 Min.
Rota-Viren	1 Min.
Polyoma SV 40	1 Min.
Noro-Virus**	30 Min.

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

** geprüft mit neuem Prüfvirus: Murines Noro-Virus

Produktdaten

Zusammensetzung:

Eine Dose enthält 200 gebrauchsfertig getränkte Tücher.

100 g Wirkstofflösung enthalten:

0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride;

0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten der Wirkstofflösung:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	ca. 0,998
Viskosität:	< 15 s. (Auslaufzeit nach DIN 53 211)
pH-Wert (20 °C):	ca. 6,0 – 8,0
Flammpunkt:	> 61 °C (DIN 51 755)

mikrozid® sensitive wipes

Besondere Hinweise

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
200 Tücher-Spenderdose	10 Dosen	109 184
200 Tücher Nachfüllbeutel	12 Beutel	109 190

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozid® sensitive wipes vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60
office.austria@schuelke.com